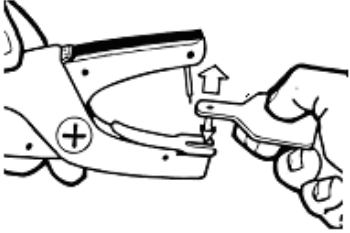
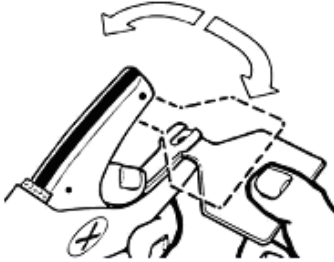



NÁVOD NA APLIKACI UŠNÍCH ZNÁMEK PRO SKOT, OVCE, KOZY A PRASATA

▶		Zkontrolujte, zda do kleští vkládáte oba díly ušní známky se stejným číslem a dále postupujte podle následujících pokynů.
1		Jehlu aplikačních kleští zaveďte do dutiny v hrotu ušní známky (samec).
2		Stlačte konec fixačního plíšku pro upevnění známky a zasuňte pod něj ušní známku s otvorem (samice). Zkontrolujte, zda je známka umístěna uprostřed.
▶		Při aplikaci ušních známek dbejte na správnou pozici aplikačních kleští. Samčí díl (s hrotem) musí být vždy umístěn vně ucha, samičí díl (s otvorem) uvnitř ucha. Opačný způsob navěšení je důvodem k zamítnutí případné reklamace ušních známek!
3		Ušní známku umístěte mezi dvě hlavní chrupavky, přibližně doprostřed mezi hlavu a konec ucha. Stiskněte rukojeti kleští tak, aby došlo ke spojení obou dílů. Vyjměte kleště z ucha.